



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Стетофонендоскоп
CS Medica CS-417**



**При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине
настоящего Руководства по эксплуатации!**

Благодарим Вас за покупку!


Характеристики стетофонендоскопа

- **БОЛЬШАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА** обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости.
- **СТЕТОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА** очень удобна для точного определения низких и средних тонов или шумов.
- **ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО МЕМБРАНЫ** обеспечивает наилучший контакт мембраны с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала.
- **ЭЛАСТИЧНЫЕ ОЛИВЫ ОГОЛОВЬЯ СТЕТОФОНЕНДОСКОПА** обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями.

Как пользоваться стетофонендоскопом

- Прибор работает в одном из двух положений головки стетофонендоскопа. Переключение прибора на работу с фонендоскопической или стетоскопической головкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка.
- Легкое постукивание пальцем по мембране позволит Вам определить, в каком положении установлена головка стетофонендоскопа.
- Если Вы не услышали звука при постукивании, поверните головку стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка.
- Повторите постукивание по мембране и Вы услышите звук. Прибор готов к работе с мембраной. При необходимости работы со стетоскопической головкой повторите вышеизложенные действия.
- Теперь Вы можете проводить осмотр при помощи стетофонендоскопа.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность при 25°C | 10 – 40°C 30 – 85 % |
| Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха относительная влажность при 25°C атмосферное давление | от – 20°C до + 60°C от 10% до 95% от 70 до 106 кПа |
| Срок службы | 2 года |
|  | Знак соответствия при добровольной сертификации |

Серийный номер и дата производства

В серийном номере прибора, который расположен на упаковке прибора и имеет вид 417 • ММГТНННННН или 421 • ММГТНННННН, зашифрована следующая информация: месяц производства (ММ), последние две цифры года производства (ГГ), номер прибора (НННННН).

В комплекте:

1. Головка фонендоскопа, включающая стетоскопическую и фонендоскопическую головки 1 шт.
2. Оголовье с эластичными оливами 1 пара
3. Y-образный звукопровод 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

Уход, хранение, техническое обслуживание, утилизация

- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, влажности и прямого солнечного света, ударов. Не храните и не используйте стетофонендоскоп в непосредственной близости от обогревательных приборов и открытого огня. Оберегайте прибор от загрязнения. Ушные оливы необходимо протирать спиртом или водой с мылом. Запрещается погружать стетофонендоскоп в любые жидкости или подвергать его стерилизации паром. Если дезинфекция стетофонендоскопа обязательна, протрите его 70 % спиртовым раствором этилового спирта. Не допускается соприкосновения стетофонендоскопа с агрессивными растворами.
- В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться в центры технического обслуживания CS Medica (адреса указаны в инструкции по эксплуатации).
- Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

Стетофонендоскопы CS Medica CS-417 испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2009/04073 от 23.05.2016 г. Срок действия не ограничен.
 - добровольный сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ41.Н01335 от 21.06.2016 г. Срок действия до 20.06.2019 г.
- Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 2 года

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты продажи. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - нарушения требований Руководства по эксплуатации;
 - наличия механических повреждений, попадания в аппарат влаги или возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
 - самостоятельного вскрытия измерительного прибора и его составляющих владельцем или третьими лицами.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные естественным износом составных частей измерительного прибора, имеющих ограниченный срок службы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях...» входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара».

Сроки службы и гарантии

| Комплектующие и (или) расходные материалы | Срок гарантии | Срок службы |
|--|---------------|-------------|
| головка фонендоскопа, включающая стетоскопическую и фонендоскопическую головки | 2 года | 2 года |
| оголовье с эластичными оливами | 2 года | 2 года |
| У-образный звукопровод | 2 года | 2 года |

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « _____ » _____ г.

Подпись
или штамп мастера

Работу принял _____
(подпись клиента)

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «CS MEDICA» В РОССИИ**

Адрес и телефоны
Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»:
**127006, Москва,
Воротниковский пер.,
д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)**

Тел/факс:
(499) 995-11-32 (многоканальный)

E-mail: **csinfo@csmedica.ru,**
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

«СиЭс Медика» в г. Москва:
пн-пт: с 09.30 до 19.00 (без перерыва
на обед), сб: с 10.00 до 18.00
(без перерыва на обед),
вс и праздничные дни - выходной



Схема расположения
Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»

- Аязмас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жукковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medica@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, rotogole@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Южная, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-bar@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиперейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Восток» (Иркутск), Жилрайон Падун, ул. 25-летия Братскэлектростанции, д. 21, тел.: (3953) 341-391, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-byansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лао, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vedimig@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@volgoda.ru
- Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Граммши, д. 73а, тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, volgoreg@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, uel@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Восток», ул. Александра Невского, д. 15/4, тел.: (3952) 205-141, 206-687, 298-458, 298-456, 291-268, vostok@csmedicark.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Йошкар-Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csjo@mail.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, csmedica16-mn@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49а, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Остружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, nikitin_cs@mail.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru

- Кострома, ООО «СисЭс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-29-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СисЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otponov@csmed.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-96, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СисЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-93, 221-20-72, 221-60-96, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СисЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-79, 74-00-73, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, ООО «СисЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lip@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СисЭс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, lip@csmedica-ural.ru
- Магачала, ООО «СисЭс Медика Магачала», ул. Дзержинского, д. 176, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40, csmaachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СисЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicaikv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СисЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), просп. Ленина, д. 5, оф. 1, тел.: (8152) 25-53-43, litmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СисЭс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8532) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижнеартовск, ООО «СисЭс Медика Югра», ул. Ямты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (902) 855-85-01, (908) 873-30-47, cstulmen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СисЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csnizn@csmedica.ru
- Новокузнецк, ООО «СисЭс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Революции 1905 года, д. 65, тел.: (8617) 64-32-51, cs-novosibirsk@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СисЭс Медика Сибирь», ул. Немирова-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СисЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, direktor55@csmedica.ru
- Орен, ООО «СисЭс Медика Орен», ул. Латышских стрелков, д. 6, тел.: (4862) 307-127, oren@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СисЭс Медика Оренбург», ул. Циолковского, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СисЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, csorshmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СисЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СисЭс Медика Пермь», ул. Милычакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СисЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мережкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 53-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Посемского, д. 10, помещение 1001, тел.: (911) 885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru
- Ростов, ООО «СисЭс Медика Черноморье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (861), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СисЭс Медика Рязань», ул. Семёна Сарына, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryzan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СисЭс Медика Самара», ул. Блюхера, д. 30, оф. 4а, тел.: (846) 267-38-33, 260-15-79, 260-15-81, csmedica-samara@sama.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», Малодетокосельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 308-09-80, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетокосельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 715-88-93, srbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СисЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СисЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsarato@mail.ru
- Саров, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz.cs1@bk.ru, arz.cs@bk.ru
- Смоленск, ООО «СисЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs.medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СисЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicasv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СисЭс Медика Белгород», ул. Ватулина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol.cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СисЭс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (912) 817-41-41, cstulmen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СисЭс Медика Тамбов», ул. Орехова, д. 10, помещ. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СисЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СисЭс Медика Самар», бувард Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-itt@yandex.ru
- Томск, ООО «СисЭс Медика Томск», ул. Назимова, д. 13/1, оф. 104, тел.: (3822) 902-703, info.tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СисЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СисЭс Медика Тюмень», ул. Хлодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70, (908) 873-30-47, cstulmen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СисЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.ulf@yandex.ru
- Уфа, ООО «СисЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшиковой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СисЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СисЭс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Савбоды, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, cheb@csmedica-ural.ru
- Череповец, ООО «СисЭс Медика Вологда», ул. Краснодонцев, д. 24, оф. 1, тел.: (8202) 20-55-33, csmedicascherovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Инонова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СисЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щварина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru



Произведено по заказу и под контролем
ООО «СиЭс Медика»

**Импортером и уполномоченной изготовителем
организацией на территории Российской Федерации,
а также государств-членов Таможенного союза
является фирма ООО «СиЭс Медика»**

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел.: (495) 363-16-52 Тел./факс: (495) 363-16-56
E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru, сиэсмедика.рф
Центр технического обслуживания в Москве:
127006, Москва,

Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многокан.)

E-mail: csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru, сиэсмедика.рф

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель:

Shenzhen Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.,
Room 1103, Guidu Building, Chunfeng Road, Luohu District,
518001 Shenzhen, People's Republic of China
Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.,
Рум 1103, Гуйду Билдинг, Чуньфэн Роуд, Лоху Дистрикт,
518001 Шэньчжень, Китайская Народная Республика

Производственное подразделение:

Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.,
No.2 Building 10 Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town,
Dantu District, 212143 Zhenjiang City, Jiangsu, People's Republic of China
Чжэньцзян Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.,
Но. 2 Билдинг 10 Либао Роуд, Саншан Индастриал Дистрикт,
Гуян Таун, Данту Дистрикт, 212143 Чжэньцзян Сити, Цзянсу,
Китайская Народная Республика