

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Перед чисткой массажера отключите его от сети.
- Протирайте корпус прибора чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства.
- Прибор необходимо чистить после каждого использования.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Храните прибор при комнатной температуре, избегайте резкого перепада температур и повышенной влажности.
- Оберегайте прибор от загрязнения, ударов и пыли.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды на поверхность корпуса во избежание удара электрическим током при дальнейшем использовании.
- Храните прибор отключенным от электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	От сети переменного тока 220 В (50 Гц)	
Мощность	20 Вт	
Скорость вибрации	Режим «I»: 3 400 ± 340 уд./мин Режим «II»: 6 000 ± 600 уд./мин	
Вес	1 400 г	
Размеры	135 x 380 x 145 мм	
Условия эксплуатации	эксплуатации	хранения
Температура	От +10°C до +40°C	От -10°C до +60°C
Влажность	От 30% до 85%	От 30% до 95%

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Изделие медицинской техники массажер медицинский МН-102 разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011. Срок действия: не ограничен.
Соответствие продукции подтверждено декларацией о соответствии согласно законодательству РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на основной блок в корпусе - 1 год.
Срок службы прибора - 2 года.

Серийные номера приборов компании ICST Corporation (АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн) включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN E1407 001491, где информативными являются выделенные цифры – 1407: 14 - год производства, 07 - месяц производства.

ЮРИДИЧЕСКИЙ/ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ICST Corporation, S-4 Tower 5-17-1 Kamiachiai, Chuou-Ku, Saitama-shi,
Saitama-ken, Japan/
АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн, С-4 Тауэр 5-17-1 Камиачиай, Чую-Ку, Сaitама-ши,
Сaitама-кен, Япония.

ИМПОРТЕР:
ООО «Эй энд Ди Рус», РФ, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
Тел.: 8 800-200-03-80
Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

АДРЕС ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Vega Technologies Inc., Yang-Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China/
Vega Technologies Инк., Янг-Ву Дистрикт, Да Ланг Таун, Донг Гуан Сити, Гуанг Донг Провинс, КНР.

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

с лампой инфракрасного излучения
Модель МН-102



NOZOMI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания ICST Corporation (АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн) благодарит Вас за покупку медицинского массажера. Мы уверены, что оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

- При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.
- Перед использованием прибора проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МН-102 – медицинский массажер, который обеспечивает интенсивный вибрационный массаж, способствует снятию тяжести и напряжения мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет. Прибор оказывает комплексное воздействие: глубокий интенсивный массаж и инфракрасную терапию. Массаж производится двумя массажными насадками.

Рекомендуется для проведения массажа:

- шеи, плечевого пояса и рук;
- ног и ступней;
- спины, бедер и абдоминальной области.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Основной блок в корпусе – 1 шт.
2. Насадки – 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Гарантийная карта – 1 шт.
5. Коробка упаковочная картонная – 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Не используйте лампу инфракрасного излучения более 15 минут за 1 сеанс массажа.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Не помещайте прибор в воду.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Отключайте массажер от сети, если вы не пользуетесь им, а также перед чисткой.
- Включайте и выключайте прибор только сухими руками.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. Обратитесь в Сервисный Центр ООО «Эй энд Ди Рус» или авторизованный Сервисный Центр.

ВНИМАНИЕ

- Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
- Используйте прибор не ранее чем через час после принятия пищи.
- Лица, носящие кардиостимулятор, должны проконсультироваться с лечащим врачом о возможности использования массажера. Массаж в области сердца в данном случае запрещен.
- Прибор нельзя применять на открытых, обожженных или травмированных участках кожи или тела.
- Нельзя массировать голову и остистые отростки позвоночника.
- Не проводите массаж при простуде с повышенной температурой, при расширении вен, тромбозе, флебите, варикозе, желтухе, диабете, беременности, невралгиях (например, при ишиасе) или при острых воспалительных процессах и при обострении сердечно-сосудистых заболеваний.
- Прибор имеет горячую поверхность. Лица нечувствительные к нагреву должны быть осторожны при обращении с прибором.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Массажер прост в использовании.
- Стимулирует крово- и лимфообращение, тем самым стимулируя обменные процессы в организме и выведение шлаков.
- Массаж препятствует скоплению жидкостей в организме.
- Способствует облегчению мышечных болей, болей в шее, спине и пояснице.
- Максимальный эффект при таком виде аппаратного массажа достигается путем направленного воздействия аппарата на биологически активные точки и сегментарно-рефлекторные зоны.
- Образующиеся на участке воздействия массажером на тело биологически активные вещества (гистамин, ацетилхолин и др.) разносятся с током крови и лимфы и оказывают стимулирующее влияние на организм.
- Улучшает фигуру и уменьшает жировые отложения в проблемных местах.
- Улучшает функционирование центральной и периферической нервных систем, оказывает расслабляющее воздействие.
- Улучшает общий тонус организма, деятельность всех его органов и систем, что способствует созданию бодрого настроения и повышает работоспособность.
- Длинная эргономичная ручка с удобным хватом позволяет без труда массировать все тело самостоятельно (в том числе и спину).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Омоложение организма за счет улучшения обменных процессов

- Усиливаются метаболические процессы и ускоряются ферментативные реакции, процессы регенерации и репарации.
- В тканях образуются биологически активные вещества: брадикинин, гистамин, ацетилхолин и другие вещества, которые играют роль в осуществлении и регуляции местного кровотока.

Укрепление иммунной системы

- Возрастающая кровяная циркуляция в мускулах ускоряет обменные процессы, которые, в свою очередь, усиливают действие иммунной системы организма, улучшают питание мускулов, повышают снабжение тканей кислородом.

Укрепление нервной системы

- Увеличившийся под действием инфракрасного излучения кровоток в периферических органах тела человека приводит к снижению артериального давления, мышечного и эмоционального напряжения.


Улучшение фигуры

- Воздействие инфракрасного излучения на проблемные зоны и жировые отложения благодаря стимулированию в них обменных процессов усиливает расщепление жира и вывод токсинов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите функциональный переключатель в положение «0» и подключите прибор к сети переменного тока.
 2. Выберите необходимый режим интенсивности массажа «I» или «II» при помощи функционального переключателя.
 3. Продолжительность массажа не должна превышать 4 минуты для отдельной части тела и 15 минут в общем. Повторное использование прибора возможно только через 10 минут.
 4. По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «0». Отключите прибор от сети переменного тока.
- Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
 - Легкие массажные круговые движения по часовой стрелке в области живота улучшают перистальтику толстого кишечника, что способствует уменьшению запоров и других функциональных расстройств кишечника.
 - Интенсивный массаж в области ягодичных мышц и мышц бедер способствует уменьшению целлюлита и лишних жировых отложений благодаря совместному действию массажных механических движений и физиотерапевтического воздействию лампы инфракрасного излучения.
 - Массаж средней интенсивности в области голени будет способствовать улучшению оттока из наружных и внутренних вен ног, а значит уменьшению тяжести и усталости в ногах после рабочего дня. Массажные движения должны быть направлены снизу вверх.
 - Массаж поверхности стопы способствует повышению Вашей жизненной энергии, успокоит нервную систему, улучшит сон.
 - Регулярное использование массажера медицинского МН-102 благоприятно отразится на Вашем здоровье, будет способствовать исчезновению проблем с позвоночником - остеохондроза, радикулита, системных защемлений нервных корешков, а значит улучшит работу внутренних органов, связанных с позвоночником.

Массаж шеи, плечевого пояса и рук

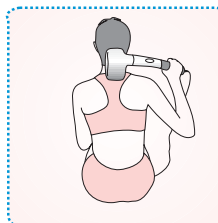

Массаж ног и ступней



Массаж спины, бедер и абдоминальной области

