

M A S S A G E W R A P

M A S S A G E 3D PAD

GÉZATONE



МАССАЖНАЯ
НАКИДКА



модель AMG-387 Gezatone

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Если вы ведете малоподвижный образ жизни;
- Много времени проводите за компьютером;
- Чувствуете напряжение в мышцах спины и шеи;
- Вас мучают головные боли и недомогания;
- Вы с трудом засыпаете вечером и плохо спите ночью;
- Испытываете болевые ощущения в спине и пояснице;
- Быстро утомляетесь и чувствуете усталость во всем теле:

ВАМ ПОМОЖЕТ МАССАЖ

Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, недомогания, стресса. Массажная накидка Gezatone «MASSAGE 3D PAD», модель AMG 387 незаменима для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего восстановления и тонизации организма.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Давно мечтаете о массажном кресле, чтобы расслабиться после тяжелого дня и снять напряжение с мышц спины?

Но цена и габариты такого гаджета зачастую не позволяют его купить и поставить в обычную квартиру.



ЗАМЕНА есть – это компактная массажная накидка «3D Pad» **Gezatone**, сочетающая в себе глубокий роликовый массаж, интенсивное вибрационное воздействие и расслабляющий прогрев.




Артикул - 1301119

ФУНКЦИИ




Массаж шеи способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающего отделов, улучшает кровообращение и снимает головную боль, снимает усталость и стресс. Ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи.

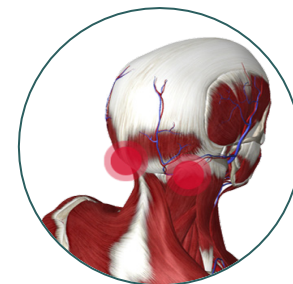

Массаж спины и поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное использование массажной накидки значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет снять усталость, уменьшить боли в пояснице.



Массаж ягодиц и бедер. Интенсивный вибромассаж позволяет сократить жировые отложения в области ягодиц и бедер, уменьшить объем, подтянуть дряблые мышцы.

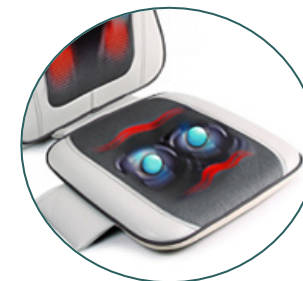

Режим прогрев для получения дополнительного расслабления мышц.

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ФУНКЦИЙ:

1. глубокий роликовый массаж;
2. интенсивное вибрационное воздействие;
3. расслабляющий прогрев.



Снимет напряжение с мышц спины и шеи, устранил «привычный» спазм, окажет расслабляющее и антистрессовое воздействие.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

- Удобный и портативный дизайн впишется в любой интерьер.
- **Функция прогрева** особенно порадует зимними холодными вечерами.
- **6 массажных режимов** на выбор сделают массаж полноценным.
- **Очень простое управление** – не вызовет сложностей даже у пожилых членов семьи.
- **Надежная система крепления** на обычном кресле позволяет использовать накидку на работе, дома или на даче.
- **Антистрессовый вибромассаж** улучшит самочувствие и сон, снимет напряжение после тяжелой работы.
- **Специальная подушка** для массажа шеи с регулировкой высоты позволит пользоваться креслом всем членам семьи.
- Массажная накидка станет незаменимым помощником и будет радовать вас долгие годы или послужит великолепным подарком для друзей и близких.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Запрещается использование во время беременности.
- Запрещается использование детьми, инвалидами, спящими или недееспособными людьми.
- Не использовать людям с малочувствительной кожей или слабой циркуляцией крови.
- Никогда не используйте на опухших и воспаленных зонах или на коже с высыпаниями.
- Никогда не используйте массажер во время сна.
- Не используйте прибор, если у Вас диагностирована онкология.
- Не используйте прибор при серьезных заболеваниях позвоночника.
- Если у Вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья, проконсультируйтесь с врачом до использования прибора.
- Людям с кардиостимулятором или с сердечно-сосудистыми заболеваниями также необходима консультация с врачом.
- Запрещается использование людьми, страдающими физическими недомоганиями, способными ограничить самостоятельное переключение регуляторов, а также людьми с пониженной чувствительностью нижней части тела.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: АС 220-240В, АС 50 Гц
- Потребляемая мощность: не более 48 Вт
- Продолжительность непрерывной работы: 15 минут
- Температура массажной накидки в режиме «прогрев»:
 - не более 45°C
 - Диапазон допустимых температур воздуха:
 - 5°C-40°C
 - Допустимый уровень влажности воздуха: 80%
- Размеры в упаковке: 480 x 320 x 450 мм
- Вес в упаковке: 11,8 кг

Артикул: 1301119

ШК EAN13: 3004564028293



M A S S A G E W R A P
M A S S A G E 3D PAD



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti