

A man and a woman are shown from the waist up, smiling and measuring their bodies with a pink tape measure. The man is on the left, shirtless and wearing grey shorts. The woman is on the right, wearing a bright green sports bra and black shorts. They are both looking towards the camera.

GÉZATONE

home health

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

BodySHAPER PRO

МОДЕЛЬ **AMG 125**



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА **BodySHAPER PRO**

модель AMG125

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Если у вас есть желание иметь стройную изящную фигуру без лишних объемов и сантиметров.
- ✓ Хотите избавиться от целлюлита и иметь гладкую ровную и упругую кожу.
- ✓ Хотите снять напряжение с мышц после тренировок.
- ✓ Улучшить самочувствие и настроение, улучшить местный кровоток и лимфоток, вернуть мышцам эластичность.
- ✓ Обеспечить глубокое проминание мышц, восстановить их работоспособность, снять усталость и ощущения дискомфорта.
- ✓ Хотите вернуть телу энергию, улучшить общее самочувствие и укрепить иммунитет.

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
BodySHAPER PRO

модель AMG125 Арт: 1301162

НОВИНКА
IR ФУНКЦИЯ
ИНФРАКРАСНОГО
ПРОГРЕВА
module

4 МАССАЖНЫЕ
насадки



модель AMG125

- ✓ Идеально подойдет для расслабления после тренировки и физических нагрузок, станет незаменимым помощником людям любого возраста и пола.
- ✓ Функция инфракрасного прогрева усилит эффекты от массажа, позволит расслабиться и снять напряжение.
- ✓ Укрепит мышечные волокна и возвратит им тонус!

GÉZATONE

home health

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
BodySHAPER PRO

модель AMG125

Арт: 1301162



4 МАССАЖНЫЕ
насадки

для различных видов массажа



«Шариковая»
насадка



«Роликовая»
насадка



Насадка
«Волна»



Насадка с эластичной
мембраной

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Массажер имеет два режима работы, управление которыми осуществляется с помощью переключателя режимов, расположенного на панели управления в верхней части аппарата:

- «0» - Питание выключено
- «1» - Классический массаж
- «2» - Классический массаж + ИК прогрев

Регулировка интенсивности массажа осуществляется с помощью изменения скорости вращения электродвигателя, т.е. частоты колебаний насадок.

В крайнем положении против часовой стрелки ручки регулятора (Min) скорость вращения и интенсивность воздействия минимальны, а крайнем положении по часовой стрелке (Max) – максимальны.



«Шариковая» и «Роликовая» насадки помогают избавиться от эффекта «апельсиновой корки» и способствуют сжиганию подкожного жира.


Насадка «Волна» улучшает контуры тела, расслабляет мышцы и снимает стресс.

Дополнительная насадка с эластичной тканевой мембраной позволяет проводить более мягкий и комфортный вариант массажа, предотвращает спутывание волос во время процедуры.

ИК-прогрев улучшает местное кровообращение и способствует снятию спазма мышц. Кроме того, инфракрасный прогрев улучшает внешний вид и тонус кожи, помогает устранить проявления целлюлита.


ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. Рекомендуемыми зонами воздействия являются плечи и задняя поверхность шеи, спина, руки и ноги (бедра, икры и ступни). Аппарат также можно использовать для массажа всего тела, кроме областей, оговоренных в разделе «Противопоказания».
2. В начале использования оказывайте массажёром легкое воздействие на нужную область. Постепенно можно увеличить интенсивность в зависимости от индивидуальных ощущений и потребностей.
3. Вы можете воспользоваться внешней помощью для достижения максимальной эффективности массажа или для воздействия на труднодоступные области тела.
4. Каждый участок массируйте не дольше 3 минут, затем переходите к другой области. После того, как аппарат использовался в течение 15 минут, обязательно отключите питание и дайте аппарату остыть.

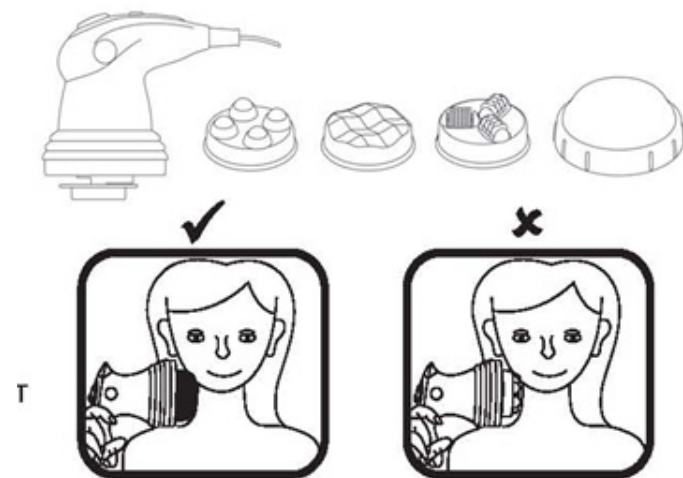

ВИДЫ МАССАЖА

- а. Общий восстанавливающий массаж.** Чтобы полностью расслабиться (условие, необходимое для хорошего массажа), следует лечь на относительно жесткую поверхность. Руки слегка отвести в стороны ладонями кверху. Начинайте массаж со свода стопы и поднимайтесь вдоль ног до седалищной складки. Затем сделайте массаж ягодиц и далее вдоль позвоночника вверх. Длительность массажа 10 минут. Нажатие и интенсивность регулируйте по ощущениям.
- в. Массаж спины.** Выполняйте плавные медленные движения вверх – вниз слева и справа от позвоночника в районе лопаток с амплитудой 30 см, не отрывая массажёра от тела. Продолжительность воздействия 5-6 минут.
- с. Массаж внутренней стороны бедра.** Сядьте на край стула или встаньте, поставив согнутую ногу на табуретку. Медленно ведите массажёром от ступни до сгиба колена и далее до ягодиц. Продолжительность воздействия 4-5 минут.
- д. Массаж бёдер и ягодиц.** Бёдра и ягодицы наиболее подвержены накоплению жировых отложений. Поэтому здесь требуется наиболее энергичный массаж. Выполняйте массаж легкими вращательными движениями снизу вверх. Продолжительность воздействия 5 минут для каждой половины тела.
- е. Массаж до и после занятий спортом.** Массажер используется перед занятиями спортом для разогрева мышц. Массажер используется после физической нагрузки для восстановления мышц, выведения из мышц молочной кислоты и токсинов. Массаж производится в направлении мышечных волокон. Движения медленные и широкие. Продолжительность 5 минут.

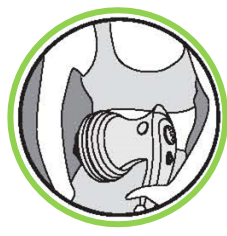

BodySHAPER PRO

GÉZATONE

СОЗДАНИЕ ВАШЕГО БЕЗУПРЕЧНОГО СИЛУЭТА!

- Изящная и стройная фигура без лишних объемов и сантиметров
- Ровная, гладкая и упругая кожа без проявлений целлюлита
- Отличное самочувствие после тренировок

Самые действенные методики в одном аппарате - глубокий вибромассаж и инфракрасный прогрев для безупречной фигуры и отличного самочувствия!

Уменьшает объемы и жировые отложения, эффективно борется с проявлениями целлюлита, снимает напряжение и спазм мышц после занятий спортом.

100%
РЕЗУЛЬТАТ

- Способствует похудению
- Выравнивает кожу
- Глубокий ИК-прогрев
- 4 сменные насадки
- Плавная регулировка мощности
- Профессиональный результат
- Усиливает действие косметики



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

BodySHAPER PRO

GÉZATONE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА!

- Расслабляющий массаж тела
- Спортивный массаж мышц
- Упругие мышцы и подчеркнутый рельеф

Отличное решение для отличной формы!

Вибромассаж в сочетании с инфракрасным прогревом зарядит мышцы энергией, подарит долгожданный отдых телу, устранил дискомфорт после физических нагрузок и придаст сил для достижения новых целей.

100%

РЕЗУЛЬТАТ

- Сжигает жировые отложения
- Укрепляет и подтягивает кожу
- «Прорисовывает» мышечный рельеф
- Глубокий ИК прогрев
- 4 сменные насадки
- Плавная регулировка мощности



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- Онкологические заболевания.
 - Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
 - Острые воспалительные процессы.
 - Нарушение целостности кожи (царапины, ссадины, экземы), раны, острые периоды травмы, дерматит в период обострения, присутствие имплантатов в тканях в зоне воздействия.
 - Гиперчувствительность кожи.
 - Состояние беременности.
 - Нельзя проводить воздействие на области с варикозным расширением вен, тромбофлебитом, области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов.
 - Нельзя оказывать воздействие на голову, позвоночник, кости, суставы, боковые и переднюю части шеи, область гениталий, грудь (для женщин).
 - При обострении какого-либо тяжелого хронического заболевания рекомендуется временно воздержаться от проведения вибромассажа.
 - Лицам, страдающим гипертонией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями, следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
- Внимание! Массаж должен быть приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача-физиотерапевта.

GÉZATONE
home health

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
BodySHAPER PRO

модель AMG125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажер для тела Body Shaper PRO модель AMG 125

Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность: не более 25 Вт.

Продолжительность непрерывной работы: не более 15 мин.

Диапазон рабочих температур +18...35°C при влажности 20-85%

Габаритные размеры (в упаковке): 245 X 200 X 136 мм.

Масса: 1,2 кг.

ШК 3004564029726

Арт: 1301162



GÉZATONE

home health

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
BodySHAPER PRO

модель AMG125



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва: **8 (495) 925-00-34**

регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

facebook.com/sozvezdiekrasoti vk.com/sozvezdiekrasoti

