

МАНЖЕТА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, тип SL

Назначение, круг пользователей, сфера применения

Манжета является принадлежностью для измерителей артериального давления, предназначенных для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или пониженным артериальным давлением. Манжета предназначена для измерения артериального давления (АД) людьми с длиной окружности плеча 25–39 см.

Данная манжета произведена для использования с электронными измерителями АД на плечевой артерии OMRON. Для удобства наложения манжеты на руку она снабжена металлическим кольцом.

Изделие предназначено для использования людьми, понимающими принцип его работы и содержание руководства по эксплуатации. Данная манжета предназначена, преимущественно, для домашнего использования.

ВНИМАНИЕ: размер манжеты должен обязательно соответствовать длине окружности плеча каждого конкретного пользователя. Несоответствие размера манжеты длине окружности плеча отрицательно сказывается на точности измерения артериального давления.

Использование манжеты

1. Соедините трубку манжеты с гнездом в корпусе тонометра. При необходимости используйте для этого соединительный элемент, входящий в комплект поставки манжеты (серый пластмассовый штуцер).
2. Используйте металлическое кольцо, сложите манжету в виде цилиндра и просуньте сквозь неё руку.
3. Если Вы собираетесь измерять АД на левой руке, наложите манжету на плечо так, чтобы синяя треугольная метка и воздушная трубка указывали на средний палец. При измерении давления на правой руке воздушная трубка должна располагаться ближе к локтевому суставу (смотрите рисунок).
4. В случае правильного наложения, середина внутренней камеры манжеты будет располагаться точно над плечевой артерией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижний край манжеты должен располагаться на 1–2 см выше локтевого сгиба. Манжета должна облежать руку относительно плотно, повторяя форму плеча.

5. Когда манжета будет надета правильно, закрепите застежку-липучку.
6. Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета была на уровне сердца. При необходимости подложите под руку подушечку или свернутое полотенце. Расслабьтесь и слегка согните пальцы.

6. Дальнейшее действие выполняйте в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации к конкретному измерителю АД.



Уход, хранение, техническое обслуживание, утилизация

- Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань, смоченную в водно мыльном растворе. Стирать манжету запрещается.
- Не допускайте сгибов, переломов и растяжений резиновой трубки и манжеты.
- Берегите манжету от попадания прямых солнечных лучей.

- Для защиты манжеты от пыли и сырости храните её в закрытом месте.

- В случае потери герметичности необходимо приобрести новую манжету.

- В случае возникновения каких-либо неполадок в работе прибора, обращайтесь в сервисные центры (адреса и телефоны указаны в настоящем руководстве по эксплуатации) или по телефону бесплатной горячей линии в России 8-800-555-00-80.

- Эту принадлежность можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Технические характеристики

Наименование	Манжета для измерителей артериального давления
Тип	SL
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха	от 10 до 40 °С
относительная влажность	от 30 до 85 %
Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха	от -20 °С до 60 °С
относительная влажность	от 10 % до 95 %
атмосферное давление	от 70 до 106 кПа
Габаритные размеры	155 мм x 555 мм

В ЛОТ номере прибора, который расположен на трубке манжеты и на упаковке и имеет вид ГТКНН, зашифрована следующая информация: год (ГГ) и квартал (К) производства, номер контейнера (НН).

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение всего срока службы. При правильной эксплуатации срок службы манжеты составит не менее 1 года.

Срок гарантии: 1 год

Модель _____ ЛОТ номер _____ Дата продажи _____

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____ Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера _____ (подпись клиента)

Манжеты для измерителей артериального давления, тип SL испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2009/04558 от 23.05.2016 г. Срок действия не ограничен.
- Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.



CS Medica

Произведено по заказу и под контролем «ООО СиЗс Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также государств-членов Таможенного союза.

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9 • Тел: (495) 363-16-52 • Тел/факс: (495) 363-16-56 • E-mail: csinfo@csmedica.ru • www.csmedica.ru
Адрес и телефоны Центра технического обслуживания в Москве 000 «СиЗс Медика ТехЭксперт»: 127006, Москва, Воротниковский переулок, д. 6, стр. 3, комната 14
E-mail: cstechexpert@mail.ru • www.cstechexpert.ru • Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

Часы работы Центра технического обслуживания:
пн-пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед), сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни – выходной
Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80
Производитель: Shenzhen Complexservice Industrial & Trade Co., Ltd., Room 1103, Guidu Building, Chunfeng Road, Luohu District, 518001 Shenzhen, People's Republic of China
Шаньчжень Комплекссервис Индустриал энд Трейд Ко., Лтд., Рум 1103, Гуйду Билдинг, Чуньфэн Роуд, Лоху Дистрикт, 518001 Шаньчжень, Китайская Народная Республика
Производственное подразделение: Zhenjiang Complexservice Industrial & Trade Co., Ltd., No.2 Building 10 Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town, Dantu District, 212143 Zhenjiang City, Jiangsu, People's Republic of China
Чжэньцзянь Комплекссервис Индустриал энд Трейд Ко., Лтд., Но. 2 Билдинг 10 Либэо Роуд, Саншан Индустриал Дистрикт, Гуйян Таун, Данту Дистрикт, 212143 Чжэньцзянь Сити, Цзянсу, Китайская Народная Республика

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ CS MEDICA В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СисЭс Медика Поволжье», ул. Жукковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medica@mail.ru
- Архангельск, ООО «СисЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СисЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СисЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СисЭс Медика Белгород», ул. Архиперейская, д. 2А, оф. 10, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СисЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41, тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СисЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, povgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СисЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СисЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СисЭс Медика Вологда», Советский пр-т, д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СисЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СисЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СисЭс Медика Иваново», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СисЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СисЭс Медика Иркутск», ул. Дзержинская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СисЭс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mar-el.ru
- Казань, ООО «СисЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СисЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СисЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, 903) 636-60-69, csmedica.kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СисЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СисЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СисЭс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СисЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omtron@kubannet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СисЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СисЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СисЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СисЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgm@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СисЭс Медика Махачкала», ул. Батраева, д. 11, оф. 734, тел.: (8722) 55-85-40, (828) 941-00-20, csmaia@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «СисЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedica@mvy@mail.ru
- Мурманск, ООО «СисЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murtmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СисЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СисЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (902) 145-15-20, cstuyten@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СисЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СисЭс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Леднева, д. 5, тел.: (8617) 75-15-00, +7-838-525-15-00, cs_medicapov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СисЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СисЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedica.omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СисЭс Медика Орёл», ул. Московская, д. 80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СисЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СисЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csrodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СисЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СисЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, permi@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СисЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерещкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СисЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossosh@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СисЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, guazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СисЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sama.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», Малодетскоельскый пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскоельскый пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СисЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СисЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцово, д. 4, пом. 2, тел.: (978) 137-90-68, +(978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СисЭс Медика Смоленск», пр-т Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasoschi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СисЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-39-96, 26-38-93, csmedicavst@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СисЭс Медика Белгород», ул. Ватугина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СисЭс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 cstuyten@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СисЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СисЭс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tvr@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СисЭс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-til@yandex.ru
- Томск, ООО «СисЭс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СисЭс Медика Тула», ул. Демонстрация, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СисЭс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70, cstuyten@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СисЭс Медика Иркутск», ул. Свердлова, д.12Г, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.ulin@yandex.ru
- Уфа, ООО «СисЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/М, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СисЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СисЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СисЭс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моб.: (921)834-78-65 csmedicascherpovets@ambler.ru
- Чита, ООО «СисЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СисЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 yaroslavl@csmedica.ru